

# CAM360 AmnioGraft™

## 患者指南

使用 CAM360 AG 搭配  
繃帶式隱形眼鏡 (BCL)



長達 **48 小時**

### 臨床應用



乾眼症



神經營養性角膜炎  
角膜敏感性降低

### 照護指示

- 治療期間，雙手務必先清潔後，才能接觸眼睛。
- 接受治療的眼睛可以貼上膠帶。若要拆下膠帶，應先閉上眼睛，接著輕輕撕開膠帶。
- 每隔 30 分鐘到 1 小時要塗抹一次不含防腐劑的人工淚液，以免 BCL 變乾。
- 不含防腐劑的人工淚液要於睡前和睡醒時塗抹，以免 BCL 變乾。
- 治療期間應避免揉眼睛。
- 治療期間避免眼睛直接接觸清水。
- 避免眼睛接觸氣霧劑、髮膠、化妝品、乳液等物品。



如果治療期間超過 **48 小時**，您的醫療保健提供者將會開給您預防性抗生素眼藥水。接受治療的眼睛應每天至少滴三次眼藥水。

### 過敏和警告

- 如果感到疼痛、發紅、分泌物、過度流淚或腫脹，請立即聯繫您的醫療保健提供者。