

CAM360 AmnioGraft™

환자 가이드

CAM360 AG의 사용 밴드 콘택트렌즈(BCL)



최대 **48시간**

임상 적용



안구건조증



신경영양성 각막염
각막 민감도 감소

케어 지침

- 치료 중 손이 눈에 닿기 전에 손을 씻으십시오.
- 치료받는 눈은 테이프로 감쌀 수 있습니다. 테이프를 제거하려면 눈을 감고테이프를 부드럽게 벗겨야 합니다.
- **BCL이 건조해지는 것을 방지하기 위해 30분에서 1시간마다 방부제가 들어 있지않은 인공 눈물을 점안하십시오.**
- **BCL이 건조해지는 것을 방지하기 위해 잠자리에 들기 전과 기상 시 방부제가 들어있지 않은 인공 눈물을 점안하십시오.**
- 치료 중 눈을 비비지 **마십시오.**
- 치료 중 눈에 직접적인 물 노출을 **피하십시오.**
- 에어로졸, 헤어스프레이, 화장품, 로션 등에 안구 노출을 **피하십시오.**



치료 기간이 48시간을 초과하면, 의료진이 예방적 항생제 안약을 처방할 것입니다. **이 점안액은 치료받는 눈에 하루에 최소 3회 투여해야 합니다.**

알레르기 및 경고

- 통증, 발적, 분비물, 과도한 찢어짐 또는 부기가 악화되면 즉시 의료진에게 연락하십시오.