

# CAM360 AmnioGraft™

## Manual del paciente

Uso de CAM360 AG con  
**Lentes de contacto  
terapéuticos (BCL)**



Hasta **48 horas**

### Usos clínicos



Enfermedad del ojo seco



Queratitis neurotrófica  
Sensibilidad corneal reducida

### Instrucciones de cuidado

- Asegúrese de lavarse las manos antes de cualquier contacto con los ojos durante el tratamiento.
- Se puede vendar el ojo tratado. Para retirar la venda, debe mantener el ojo cerrado y despegar la venda con cuidado.
- **Aplique lágrimas artificiales sin conservantes, cada 30 minutos a 1 hora, para evitar que el BCL se seque.**
- **Aplique lágrimas artificiales sin conservantes antes de dormir y al despertarse, para evitar que el BCL se seque.**
- **Evite** frotarse el ojo durante el tratamiento.
- **Evite** la exposición directa del ojo con el agua durante el tratamiento.
- **Evite** la exposición ocular a aerosoles, lacas para el cabello, cosméticos, lociones, etc.



**Si la duración del tratamiento excede las 48 horas,** su proveedor de atención médica le recetará gotas antibióticas profilácticas para los ojos. **Estas gotas se deben administrar al menos tres veces al día en el ojo tratado.**

### Alergias y advertencias

- Si experimenta empeoramiento del dolor, enrojecimiento, secreción, lagrimeo excesivo o hinchazón, comuníquese de inmediato con su proveedor de atención médica.