

CAM360 AmnioGraft™

Hướng Dẫn Dành Cho Bệnh Nhân

Sử dụng CAM360 AG với

Kính Áp Tròng Băng Mắt (BCL)



Lên đến **48 giờ**

Ứng Dụng
Lâm Sàng



Bệnh Khô Mắt



Viêm Giác Mạc Dinh Dưỡng Thần Kinh
Suy Giảm Độ Nhạy Của Giác Mạc

Hướng dẫn
chăm sóc

- Đảm bảo vệ sinh tay sạch sẽ trước khi tiếp xúc với mắt trong suốt quá trình điều trị.
- Mắt được điều trị có thể được dán băng dính. Để tháo băng dính, nên nhắm mắt và nhẹ nhàng gỡ băng.
- Nhỏ nước mắt nhân tạo không chứa chất bảo quản cứ sau 30 phút đến 1 giờ để tránh khô BCL.
- Nhỏ nước mắt nhân tạo không chứa chất bảo quản trước khi đi ngủ và khi thức dậy, để tránh khô BCL.
- Tránh dụi mắt trong quá trình điều trị.
- Tránh để nước tiếp xúc trực tiếp với mắt trong quá trình điều trị.
- Tránh để bình xịt, keo xịt tóc, mỹ phẩm, kem dưỡng da, v.v. tiếp xúc với mắt.



Nếu thời gian điều trị vượt quá 48 giờ, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe của bạn sẽ kê đơn thuốc nhỏ mắt kháng sinh dự phòng. **Nên dùng những thuốc nhỏ mắt này ít nhất ba lần mỗi ngày cho mắt được điều trị.**

Dị Ứng &
Cảnh Báo

- Nếu bạn bị đau mắt, đỏ mắt, tiết dịch, chảy nước mắt quá mức hoặc sưng tấy, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức.