

CAM360 AmnioGraft™

Guía del paciente

Uso de CAM360 AG con

Escudo de Colágeno (CS)



Hasta **72 horas**

Aplicaciones clínicas



Queratoconjuntivitis seca
(síndrome del ojo seco)



Queratitis neurotrófica
Sensibilidad corneal reducida

Instrucciones de uso

- Asegúrese de lavarse las manos antes de cualquier contacto con los ojos durante el tratamiento.
- **Aplique lágrimas artificiales sin conservantes al menos tres veces al día.**
- El ojo tratado debe permanecer vendado entre 48 y 72 horas.
- Para remover el vendaje, se debe mantener el ojo cerrado y despegar suavemente la cinta.
- Después de remover la cinta, continúe aplicando las lágrimas artificiales sin conservantes tres veces al día.
- Si el CS o el tejido se desprende, o se sale después de retirar la cinta, no es preciso preocuparse. Notifíquese a su proveedor de asistencia médica en su consulta de seguimiento.
- **Evite** restregarse los ojos durante el tratamiento.
- **Evite** la exposición directa del ojo al agua durante el tratamiento.
- **Evite** la exposición ocular a aerosoles, fijador de cabellos, cosméticos, lociones, etc.

Alergias y advertencias

- Si tiene alergia al colágeno o a los productos de origen bovino, debe informarlo a su proveedor de asistencia médica. No se someta al tratamiento con CS. Los posibles síntomas de reacción alérgica pueden incluir enrojecimiento, lagrimeo, picor o hinchazón.
- Es posible que experimente una sensación temporal de escozor tras la inserción del CS, que desaparecerá en unos instantes. En caso contrario, informe a su médico.

biotissue.com/ocular

7300 Corporate Center Dr, Suite 700, Miami, FL 33126 | 888.296.8858

© 2025 BioTissue Holdings Inc. Todos los derechos reservados | US-CAM360-0113 04/25

CAM360 AmnioGraft™ es una marca registrada de BioTissue Holdings Inc. Todas las demás marcas utilizadas en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.