

¿Qué es CAM360 AmnioGraft™?

CAM360 AmnioGraft (CAM360 AG) está elaborado con membrana amniótica crioconservada (CAM) humana, conocida por su capacidad natural para promover la cicatrización.¹ Con sus propiedades antiinflamatorias y anticicatriciales, puede ayudar al cuerpo a restaurar la salud de los ojos.²

Se ha demostrado que la CAM reduce los signos y síntomas asociados con la enfermedad del ojo seco.³



¿Qué es el tejido de membrana amniótica?

La membrana amniótica es parte de la placenta que rodea y protege al bebé durante el embarazo. Este tejido único es conocido por su capacidad natural para promover la cicatrización.² Con más de 25 años de evidencia clínica, BioTissue utiliza su método patentado de procesamiento de crioconservación CryoTek®. Este método conserva un componente clave que ayuda a reducir la inflamación, minimiza el tejido cicatricial y favorece la cicatrización del ojo.⁴

Cuándo su médico puede recomendarle CAM360 AG

CAM360 AG se desarrolló para optimizar la comodidad de los pacientes con enfermedad del ojo seco en fase inicial y sensibilidad corneal reducida.



Leve a moderada:
queratitis puntada
superficial (QPS)
Enfermedad del ojo
seco (EOS)



Queratitis neurotrófica
(QN)
Fase 1

Beneficios del tratamiento con CAM360 AG

Los tratamientos tradicionales a menudo se centran en solo un aspecto del ojo seco: reducir la inflamación o promover la cicatrización. Sin embargo, la CAM hace ambas cosas.²

La CAM ejerce acciones antiinflamatorias y anticicatriciales que pueden ayudar a promover la capacidad natural de cicatrización del cuerpo.² La evidencia clínica también demuestra el papel de la CAM en la regeneración nerviosa de pacientes que sufren de ojo seco.³

¿De dónde proviene el tejido de membrana amniótica?

El tejido es donado por madres sanas que dan su consentimiento después de un parto tradicional o una cesárea programada en los EE. UU. La idoneidad de la donante se determina a través de una evaluación social, física y médica en estricto cumplimiento de todas las Prácticas Recomendadas Actuales de Tejidos (CGTP, por sus siglas en inglés) según lo exigen la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los rigurosos requisitos de la Asociación Estadounidense de Bancos de Tejidos (AATB).

¿Es CAM360 AG segura?

La membrana amniótica que contiene CAM360 AG es proporcionada por un banco de tejidos registrado ante la FDA. El tejido pasa por numerosas pruebas de seguridad y control de calidad antes de que se le entregue a su médico. Si tiene alguna pregunta sobre el uso de CAM360 AG para el tratamiento de sus ojos, consulte a su médico.



"Mi visión se aclaró mucho, como al limpiar una lente sucia. Tan solo una semana después, viajé a Colorado y, por primera vez en años, no tuve **dolor en los ojos, ni sequedad, ni enrojecimiento**".

Nota: los resultados individuales pueden variar.

- Paciente de CAM360 AG



Se ha demostrado que la membrana amniótica crioconservada (**CAM**) reduce los signos y síntomas asociados con la **enfermedad del ojo seco**.³


Qué esperar




CAM360 AG se extiende sobre un **escudo de colágeno (CS)** o una **lente de contacto terapéutica (BCL)** y luego se coloca sobre la superficie ocular.

Según el método de colocación, el tratamiento generalmente dura hasta 72 horas.

Pregunte a su médico qué método de colocación utilizará y **escanee el código QR** para obtener una guía sencilla de su tratamiento con CAM360 AG.

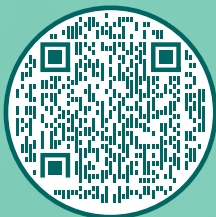

Escudo de colágeno (CS)
Guía de tratamiento

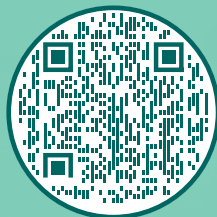

Lente de contacto terapéutica (BCL)
Guía de tratamiento

1. Tighe S, Mead OG, Lee A, Tseng SCG. *Taiwan J Ophthalmol*. 2020 Mar 4;10(1):3-12. 2. Data on File. 3. John, T., Tighe, S., Sheha, H., Hamrah, P., Salem, Z. M., Cheng, A., ... & Rock, N. D. (2017). Corneal nerve regeneration after self-retained cryopreserved amniotic membrane in dry eye disease. *Journal of Ophthalmology*, 2017. 4. Tan EK, Cooke M, Mandrycky C, et al. Structural and biological comparison of cryopreserved and fresh amniotic membrane tissues. *J Biomater Tissue Eng*. 2014;(4):379-388.



www.biotissue.com/ocular
7300 Corporate Center Dr, Suite 700
Miami, FL 33126 | 888.296.8858
© 2025 BioTissue Holdings Inc.
All rights reserved | US-CAM360-0108 11/25 ES



Desarrollado para optimizar la comodidad

¡Sienta la diferencia!

