

CAM360 AmnioGraft™ là gì?

CAM360 AmnioGraft (CAM360 AG) làm từ Màng Ối Được Bảo Quản Đông Lạnh (CAM) của con người, được biết đến với khả năng tự nhiên trong việc thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương.¹ Nhờ có đặc tính chống viêm và chống sẹo, sản phẩm này có thể giúp cơ thể phục hồi sức khỏe cho mắt.²

CAM đã được chứng minh là làm giảm các dấu hiệu và triệu chứng liên quan đến Bệnh Khô Mắt.³



Mô Màng Ối là gì?

Màng Ối là một phần của nhau thai, bao quanh và bảo vệ thai nhi trong suốt quá trình mang thai. Mô đặc biệt này được biết đến với khả năng tự nhiên trong việc thúc đẩy quá trình lành vết thương.² Được kiểm chứng hiệu quả lâm sàng trong suốt hơn 25 năm qua, BioTissue sử dụng phương pháp bảo quản đông lạnh CryoTek® độc quyền của mình để xử lý mô. Phương pháp này bảo tồn một thành phần quan trọng giúp giảm viêm, giảm thiểu sẹo và hỗ trợ chữa lành mắt của bạn.⁴

Thời điểm bác sĩ khuyên dùng CAM360 AG

CAM360 AG được phát triển nhằm tối ưu hóa sự thoải mái cho bệnh nhân bị Bệnh Khô Mắt giai đoạn đầu và suy giảm độ nhạy của giác mạc.



Mức độ Nhẹ đến Trung Bình:
Viêm Giác Mạc Chấm Nồng
(SPK) do Bệnh Khô Mắt (DED)



Viêm Giác Mạc Dinh Dưỡng Thần Kinh (NK)
Giai đoạn 1

Lợi Ích Điều Trị của CAM360 AG

Các phương pháp điều trị truyền thống thường chỉ tập trung vào một khía cạnh của bệnh khô mắt – hoặc là giảm viêm hoặc thúc đẩy quá trình lành vết thương. Tuy nhiên, CAM có thể làm được cả hai.²

CAM có tác dụng chống viêm và chống sẹo, có thể giúp thúc đẩy khả năng tự lành vết thương của cơ thể.² Bằng chứng lâm sàng cũng chứng minh vai trò của CAM trong việc tái tạo dây thần kinh cho bệnh nhân bị bệnh khô mắt.³

Mô Màng Ối có nguồn gốc từ đâu?

Mô này được những người mẹ khỏe mạnh đồng ý hiến tặng sau khi sinh thường hoặc Sinh Mổ theo kế hoạch ở Hoa Kỳ. Sự phù hợp của Người Hiến Tặng được xác định thông qua quá trình sàng lọc về mặt xã hội, thể chất và y tế, tuân thủ nghiêm ngặt mọi Thực Hành Tốt Về Mô Hiện Hành (CGTP) theo quy định của Hoa Kỳ. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) và các yêu cầu nghiêm ngặt của Hiệp hội Ngân hàng Mô Hoa Kỳ (AATB).

CAM360 AG có an toàn không?

Màng Ối trong CAM360 AG do một ngân hàng mô đã đăng ký với FDA cung cấp. Mô đã vượt qua nhiều quy trình kiểm tra kiểm soát chất lượng và độ an toàn rồi mới được cung cấp cho bác sĩ. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc sử dụng CAM360 AG để điều trị cho mắt, hãy trao đổi với bác sĩ.



"Thị lực của tôi trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, như thể vừa lau sạch một lớp kính mờ vậy. Chỉ một tuần sau, tôi đã đến Colorado, và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không còn đau mắt, khô mắt hay đỏ mắt nữa."

Lưu ý: Kết quả điều trị có thể khác nhau tùy từng cá nhân.

– Bệnh nhân sử dụng CAM360 AG



Màng Ối Bảo Quản
Đông Lạnh (**CAM**) đã
được chứng minh là
giúp giảm các dấu hiệu
và triệu chứng liên quan
đến **Bệnh Khô Mắt**.³


Những điều cần biết




CAM360 AG được đặt trong một **Màng Bảo Vệ Bằng Collagen (CS)** hoặc **Kính Áp Tròng Bằng Mắt (BCL)**, rồi được đặt lên Bề Mặt Nhãn Cầu.

Tùy theo phương pháp sử dụng, thời gian điều trị thường kéo dài tối đa 72 giờ.

Hãy hỏi bác sĩ của bạn về phương pháp điều trị mà họ sẽ sử dụng và **quét mã QR** để xem hướng dẫn để hiểu về quá trình điều trị bằng CAM360 AG.

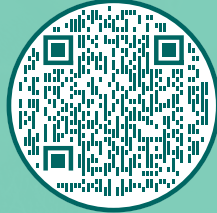

**Màng Bảo Vệ Bằng Collagen
(CS)**
Hướng Dẫn Điều Trị

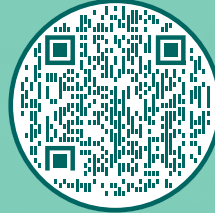

**Kính Áp Tròng Bằng Mắt
(BCL)**
Hướng Dẫn Điều Trị

1. Tighe S, Mead OG, Lee A, Tseng SCG. *Taiwan J Ophthalmol*. 2020 Mar 4;10(1):3-12. 2. Data on File. 3. John, T., Tighe, S., Sheha, H., Hamrah, P., Salem, Z. M., Cheng, A., ... & Rock, N. D. (2017). Corneal nerve regeneration after self-retained cryopreserved amniotic membrane in dry eye disease. *Journal of Ophthalmology*, 2017. 4. Tan EK, Cooke M, Mandrycky C, et al. Structural and biological comparison of cryopreserved and fresh amniotic membrane tissues. *J Biomater Tissue Eng*. 2014;(4):379-388.



www.biotissue.com/ocular
7300 Corporate Center Dr, Suite 700
Miami, FL 33126 | 888.296.8858
© 2025 BioTissue Holdings Inc.
All rights reserved | US-CAM360-0108 11/25 VI



Được Phát Triển Để Mang Lại
Cảm Giác Thoải Mái Tối Đa

Cảm Nhận Sự Khác Biệt!

